

# A preparação da IDAL® para a vacinação

**1**
**IDAL® na caixa transportadora**

**2**
**Inserir a bateria totalmente carregada**

**3**
**Navegar no menu e repor os contadores a zero**


Pressionar o botão do lado esquerdo durante 5 segundos para colocar o contador a zero

**4**

Com o espigão voltado para baixo, inserir o frasco do líquido de limpeza


**5**

Pressionar e segurar o gatilho 10 vezes e enxaguar. Certificar que o fluxo sai uniforme de cada ponteira, ao utilizar uma IDAL® Twin



Certifique-se de que a bolha pequena fica dentro da bolha grande

**6**

Com o espigão voltado para baixo, perfurar a parte de borracha no centro da tampa do frasco e insrir a vacina. Pressionar na parte inferior e girar


**7**

Pressionar e segurar o gatilho até que o fluxo pare e os porcos apareçam no visor


**8**

Agora está tudo pronto para vacinar os porcos

